

Informations sur les produits Navina Smart

Description du produit

Système d'irrigation transanal avec unité de contrôle électronique.

Durée de vie et utilisations

Tous les composants du système d'irrigation Navina ont une durée de vie de 3,5 ans, à l'exception des sondes Navina et du cône Navina, qui ont une durée de vie de 2 ans. Lorsque les composants Navina sont emballés par lots, le composant ayant la durée de vie la plus courte détermine la durée de vie du lot.

Notez que l'unité de contrôle Navina Smart dispose également d'une « date de recharge » réglée sur 1,5 an à compter de la date de fabrication.

Les sonde et cônes Navina sont à usage unique, le réservoir d'eau a 15 utilisations, l'ensemble de tubes a 100 utilisations et l'unité de commande Navina Smart, 400 utilisations ou deux ans à compter de la date de la première utilisation.

Matériaux

Matériaux composant la sonde: styrène-éthylène/butylène-styrène (SEBS)/polypropylène (PP) avec un revêtement en polyvinylpyrrolidone (PVP) hydrophile.

Matériau de l'emballage principal: pochette en PE/PET.

Matériau de l'emballage secondaire: carton et carton ondulé.

Usage prévu

Navina Systems est destiné à l'irrigation transanale par instillation d'eau dans la partie inférieure du côlon à l'aide d'une sonde rectale.

Indications d'utilisation

Navina Systems est recommandé pour aider les adultes et les enfants âgés de plus de 3 ans souffrant d'incontinence fécale, de constipation chronique et/ou contraints de réaliser des soins de l'intestin chronophages. L'instillation d'eau dans la partie inférieure du côlon permet de stimuler les muscles péristaltiques de l'intestin et de déclencher l'évacuation du contenu du côlon inférieur et du rectum.

Contre-indications

N'UTILISEZ PAS Navina Systems si vous êtes concerné(e) par l'un des cas suivants:

- Sténose anale ou colorectale connue.
- Maladie inflammatoire de l'intestin.
- Diverticulite aiguë.
- Cancer colorectal.
- Colite ischémique.
- Vous avez subi une chirurgie anale ou colorectale il y a moins de 3 mois.
- Vous avez subi une polypectomie endoscopique il y a moins de 4 semaines.

La liste des contre-indications n'étant pas exhaustive, les professionnels de santé tiendront également toujours compte des facteurs individuels.



Navina Smart System

Référence	Descriptif	Spécification
6900960	Système Navina Smart Regular (standard)	1 Unité de contrôle Navina Smart 1 Chargeur
6901060	Système Navina Smart Small (sondes courtes)	1 Câble 1 Réservoir d'eau
6901960	Cône du système Navina Smart	1 Jeu de tubulures 2 Sondes rectales 1 Coffret Navina 1 Jeu d'accessoires
6900300	Consommables du système Navina Regular (standard)	
6900400	Consommables du système Navina Small (sondes courtes)	1 Réservoir d'eau
6901600	Kit de consommables pour cône Navina	15 Sondes rectales
6894000	Kit de sondes Navina Regular (standard)	
6894300	Kit de sondes Navina Small (courtes)	10 Sondes rectales
6901100	Jeu de tubulures Navina	1 Tubulure pour sonde rectale 1 Tubulure pour réservoir d'eau
6901200	Accessoires Navina	2 Anneaux de préhension (1 vertical, 1 horizontal) 1 Tour de cou 1 Attache de positionnement 1 Clip de positionnement de l'unité de contrôle Navina Smart
6901460	Unité de contrôle Navina Smart	1 unité de contrôle Navina Smart 1 chargeur 1 Câble

Navina™ Smart

