

Information sur le produit Navina Insert

Description du produit

Bouchon anal.

Durée de vie et utilisations

La durée de vie de Navina Insert est de 5 ans.
Navina Insert est un produit à usage unique et ne doit être utilisé qu'une seule fois avant d'être mis au rebut.

Matériaux

Matériau de l'insert: élastomère de silicone, huile minérale, vaseline.

Matériau de l'emballage principal: PE/nylon.

Matériau de l'emballage secondaire: carton ondulé.

Usage prévu

L'insert pour incontinence fécale est un insert recto-anal destiné à aider les patients adultes, âgés de 18 ans et plus, et les soignants dans la prise en charge de l'incontinence fécale. Le dispositif est conçu pour aider à prévenir les fuites involontaires de matières fécales par le canal anal. Ce dispositif médical à usage unique est inséré par l'anus dans le canal anal et le rectum. Il s'engage dans la jonction ano-rectale et le canal anal et s'y adapte pour contrôler les fuites accidentelles de matières fécales.

Indications d'utilisation

Navina Insert est indiqué pour la prise en charge des fuites accidentelles de matières fécales causées par l'incontinence fécale. L'insert rectal est conçu pour une auto-insertion dans le rectum afin d'aider à prévenir les fuites accidentelles de matières fécales.

Risques

- Légère irritation ou inconfort possible au niveau de l'anus ou du canal anal.
- Migration ou déplacement possible de l'insert dans le canal anal ou le rectum.
- Expulsion inattendue.

Avertissements, précautions et contre-indications

Les fuites fécales peuvent être traitées médicalement. Navina Insert n'est pas destiné à remplacer les options chirurgicales pour traiter les fuites fécales. Consultez votre médecin pour obtenir des conseils professionnels.

- Navina Insert est contre-indiqué dans la population pédiatrique.
- Ce dispositif est non stérile et est à usage unique.
- La réutilisation du dispositif pourrait entraîner sa casse.
- Ne pas utiliser si l'emballage est déjà ouvert ou endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie au silicone.
- Ne pas utiliser avec des suppositoires.

Arrêtez d'utiliser Navina Insert et consultez votre médecin dans les cas suivants:

- Présence de sang dans les selles ou saignement du rectum.
- Saignements d'hémorroïdes.
- Douleur, irritation, spasmes, déchirure ou fissure au niveau de l'anus ou du rectum.
- Déplacement de l'insert pour incontinence fécale dans le canal anal ou le rectum, et l'insert n'a pas été expulsé lors des selles suivantes.
- Chirurgie rectale depuis moins de 4 semaines.



Navina Insert

Référence	Descriptif	Spécification
6930400	Navina Insert, Standard	Boîte de 30 unités
6930500	Navina Insert Large (grand)	Boîte de 30 unités
6930600	Pack de démarrage Insert Navina	Boîte de 5 unités Standard et 5 unités Large (grandes)

Navina[™] Insert



Manufacturer: Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest Stewartville,
MN 55976 USA 507-533-0366
<https://www.mnmedicaltechnologies.com/>



Importer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1,
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.fr.wellspect.ch



MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20 Braunfels 35619
Germany